

# Traitement de plaies en cas de



## ÉCORCHURES

- Grande partie de saletés (gravier p.ex.) à ôter avec une pincette
- Rincer la plaie avec Prontosan® Spray pour plaies et libérer de la saleté
- Ensuite appliquer Prontosan® acute Gel cicatrisant
- Recouvrir la plaie avec un pansement (compresse p.ex.)



## COUPURES

- Nettoyer d'abord la plaie avec Prontosan® Spray pour plaies en cas de fortes salissures (coupure par un couteau à viande p.ex.)
- Appliquer ensuite Prontosan® acute Gel cicatrisant
- Recouvrir la plaie avec un pansement (sparadrap p.ex.)



## DÉCHIRURES

- Nettoyer la plaie avec Prontosan® Spray pour plaies
- Appliquer ensuite Prontosan® acute Gel cicatrisant
- Recouvrir la plaie avec un pansement (compresse ou sparadrap p.ex.)
- En cas de déchirures importantes ou saignantes, qui doivent être suturées, consulter un médecin



## LÉGÈRES BRÛLURES DES 1<sup>ER</sup> ET 2<sup>E</sup> DEGRÉS

- Première mesure : rafraîchir pendant 10 minutes au max. à l'eau courante tiède
- Appliquer abondamment Prontosan® acute Gel cicatrisant et recouvrir d'une compresse enduite si nécessaire
- Ne pas percer les ampoules existantes
- Un coup de soleil peut aussi être traité avec Prontosan® acute Gel cicatrisant



À DOMICILE ET  
EN VOYAGE



[petiteplaie.ch](http://petiteplaie.ch)

Prontosan® Spray pour plaies  
Prontosan® acute Gel cicatrisant

Petite plaie  
Aide rapide

# Petite plaie – Aide rapide

Que ce soit au quotidien, en voyage ou en déplacement – les petites blessures arrivent très vite – chez les enfants ainsi que les adultes ! L'important est de traiter une plaie aiguë correctement et soigneusement.

Pour cela, un nettoyage de plaie approfondi et un traitement de plaie humide sont indispensables. Prontosan® Spray pour plaies et Prontosan® acute Gel cicatrisant nettoient et protègent de possibles infections. L'hydrogel et le spray humidifient la plaie, peuvent apaiser les douleurs et aident à une guérison rapide, grâce au traitement de plaie humide.

Prontosan® est d'utilisation facile et son efficacité prouvée cliniquement.

- Nettoie, humidifie et rafraîchit
- Apaise la douleur
- Prévient les infections
- Réduit la formation de cicatrices

## NETTOYAGE DE LA PLAIE

**Premiers soins**  
Empêche les infections de plaies



## TRAITEMENT DES PLAIES EN MILIEU HUMIDE



**Suite du traitement**  
Confère un milieu humide de la plaie



### BON À SAVOIR

Il était autrefois recommandé de maintenir les plaies au sec et de les soigner à l'aide de pommades et de crèmes. Ce conseil est obsolète. Les corps gras offrent un milieu nutritif aux micro-organismes, ce qui augmente le risque d'infection de la plaie. En outre, la formation d'une croûte ralentit la cicatrisation et laisse des cicatrices pour le moins inesthétiques.

# Traitement des plaies avec Prontosan®



Arrêter le saignement et ôter les grands corps étrangers avec une pincette.



Recommandation : Si la plaie est très sale, la rincer avec **Prontosan® Spray** pour plaies et la débarrasser des impuretés.



Appliquer **Prontosan® acute Gel** cicatrisant.



Recouvrir ensuite la plaie avec un pansement respirant.

### PRONTOSAN® EN LIGNE

Découvrez les nombreuses possibilités d'utilisation de Prontosan® Spray pour plaies et acute Gel cicatrisant, des conseils et astuces pour le traitement moderne des plaies et bien plus sur notre site [petiteplaie.ch](http://petiteplaie.ch).



### QUAND CONSULTER UN MÉDECIN?

Lorsque la plaie saigne abondamment, est profonde ou doit être recousue. Dans tous les cas lors de morsures. Renouveler éventuellement la vaccination antitétanique.