

# Wundversorgung bei



## SCHÜRFWUNDEN

- Grosse Schmutzpartikel (z.B. Kieselsteine) mit Pinzette entfernen
- Wunde ausspülen (z.B. mit Prontosan® Wundspray) und vom Schmutz befreien
- Prontosan® acute Wundgel auftragen
- Wunde mit einer Wundauflage (z.B. Askina® Pad Vlieskomresse) abdecken



## SCHNITTWUNDEN

- Bei starker Verschmutzung die Wunde zuerst reinigen (z.B. mit Prontosan® Wundspray)
- Prontosan® acute Wundgel auftragen
- Die Wunde mit einer Wundauflage (z.B. Pflaster) abdecken



## PLATZWUNDEN

- Wunde reinigen (z.B. mit Prontosan® Wundspray)
- Prontosan® acute Wundgel auftragen
- Wunde mit einer Wundauflage (z.B. Kompresse oder Pflaster) abdecken
- Bei grossen oder stark blutenden Platzwunden, die genäht werden müssen, den Arzt aufsuchen



## LEICHTE VERBRENNUNGEN GRAD 1 UND 2

- Erstmassnahme: mit lauwarmem, fliessenden Leitungswasser max. 10 Minuten kühlen
- Prontosan® acute Wundgel grosszügig auftragen und gegebenenfalls mit einer beschichteten Kompresse abdecken
- Entstandene Brandblase nicht öffnen
- Prontosan® acute Wundgel hilft auch bei Sonnenbrand



FÜR UNTERWEGS  
UND ZUHAUSE



[kleinewunde.ch](http://kleinewunde.ch)

Prontosan<sup>®</sup> acute Wundgel  
Kleine Wunde  
Schnelle Hilfe

# Kleine Wunde – Schnelle Hilfe

Schnell ist es passiert: Beim Spielen das Knie aufgeschürft, beim Kochen in den Finger geschnitten, beim Bräteln die Hand verbrannt... kein Grund zur Sorge, denn kleine Wunden bei Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen können Sie ganz einfach, sicher und schnell selber versorgen.

Prontosan® ist ein Schweizer Medizinprodukt das bereits seit vielen Jahren erfolgreich im Spital in der modernen Wundbehandlung eingesetzt wird.

Prontosan® acute Wundgel reduziert Keime und beugt Wundinfektionen vor. Durch die kühlende Wirkung wird der Schmerz gelindert, die Wunde befeuchtet und die Narbenbildung minimiert.

Prontosan® ist einfach in der Anwendung und die Wirksamkeit klinisch erwiesen.




- 
- Reinigt, befeuchtet und kühlt
  - Lindert den Schmerz
  - Beugt Wundinfektionen vor
  - Minimiert die Narbenbildung
- 




## GUT ZU WISSEN

Die Empfehlung, Wunden trocken zu halten und mit Salben und Cremes zu versorgen, ist veraltet. Die enthaltenen Fette begünstigen den Nährboden für Mikroorganismen mit dem Risiko einer Wundinfektion. Durch die Krustenbildung verlangsamt sich zudem die Wundheilung, zurück bleiben unschöne Narben.


# Anwendung von Prontosan® acute Wundgel

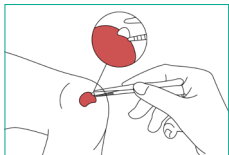


Die Blutung stillen und grosse Fremdkörper mit einer Pinzette entfernen.

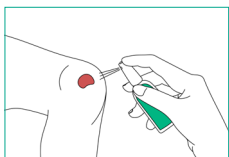

Empfehlung: Bei stark verschmutzten Wunden Prontosan® Wundspray zum ausspülen verwenden und Wunde vom Schmutz befreien.

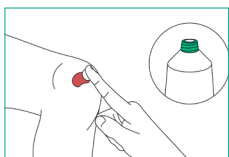

Prontosan® acute Wundgel grosszügig auf die Wunde auftragen.

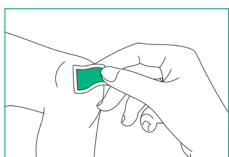

Wunde mit einer atmungsaktiven Wundaufgabe abdecken.



## PRONTOSAN® ONLINE

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Prontosan® Wundspray & acute Wundgel, wertvolle Tipps und Tricks zur modernen Wundbehandlung und vieles mehr finden Sie jetzt auch online unter [kleinewunde.ch](http://kleinewunde.ch).



## WANN ZUM ARZT?

Wenn die Wunde stark blutet, tief ist oder genäht werden muss. In jedem Fall bei Bisswunden. Eventuell Tetanusimpfung erneuern.