

# Traitement de plaies en cas de



## ÉCORCHURES

- Grande partie de saletés (gravier p.ex.) à ôter avec une pincette
- Rincer la plaie (p. ex. avec Prontosan® Spray pour plaies) et libérer de la saleté
- Appliquer Prontosan® acute Gel cicatrisant
- Couvrir la plaie avec un pansement (p. ex. compresse non tissée Askina® Pad)



## COUPURES

- Si la plaie est très souillée, la nettoyer d'abord (p. ex. à l'aide de Prontosan® Spray pour plaies)
- Appliquer Prontosan® acute Gel cicatrisant
- Couvrir la plaie avec un pansement (p. ex. compresse non tissée Askina® Pad)



## LACÉRATIONS

- Nettoyer la plaie (p. ex. avec Prontosan® Spray pour plaies)
- Appliquer Prontosan® acute Gel cicatrisant
- Couvrir la plaie d'un pansement (p. ex. compresse non tissée Askina® Pad)
- En cas de déchirures importantes ou saignantes, qui doivent être suturées, consulter un médecin



## LÉGÈRES BRÛLURES DES 1<sup>ER</sup> ET 2<sup>E</sup> DEGRÉS

- Première mesure : rafraîchir pendant 10 minutes au max. à l'eau courante tiède
- Appliquer abondamment Prontosan® acute Gel cicatrisant et recouvrir d'une compresse enduite si nécessaire
- Ne pas percer les ampoules existantes
- Un coup de soleil peut aussi être traité avec Prontosan® acute Gel cicatrisant



À DOMICILE ET  
EN VOYAGE



[petiteplaie.ch](http://petiteplaie.ch)

# Prontosan<sup>®</sup> acute Gel cicatrisant

Petite plaie  
Aide rapide

# Petite plaie – Aide rapide

Un accident est vite arrivé : une écorchure au genou en faisant du sport, une coupure au doigt en cuisinant, une brûlure en tournant la viande sur la grille du barbecue... ne vous inquiétez pas, vous pouvez traiter vous-mêmes facilement, rapidement et en toute sécurité les petites plaies chez les adultes, les enfants et les nouveau-nés.

Prontosan® est un dispositif médical suisse utilisé avec succès dans les hôpitaux depuis des années pour le traitement moderne des plaies. Prontosan® acute Gel cicatrisant réduit les germes et prévient l'infection des plaies. Son effet rafraîchissant soulage la douleur, humidifie la plaie et limite la formation de cicatrices.

La gamme Prontosan® est facile à utiliser et son efficacité est cliniquement prouvée.




- 
- Nettoie, humidifie et refroidit
  - Apaise la douleur
  - Prévient les infections
  - Réduit la formation de cicatrices
- 




## BON À SAVOIR

Il était autrefois recommandé de maintenir les plaies au sec et de les soigner à l'aide de pommades et de crèmes. Ce conseil est obsolète. Les corps gras offrent un milieu nutritif aux micro-organismes, ce qui augmente le risque d'infection de la plaie. En outre, la formation d'une croûte ralentit la cicatrisation et laisse des cicatrices pour le moins inesthétiques.


# Application de Prontosan® acute Gel cicatrisant

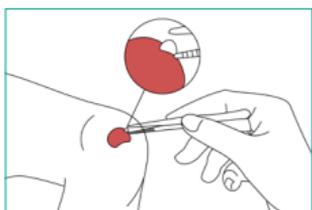


Arrêter le saignement et ôter les grands corps étrangers avec une pincette.

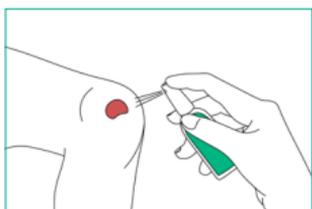

Recommandation : Si la plaie est très sale, la rincer avec Prontosan® Spray pour plaies et la débarrasser des impuretés.

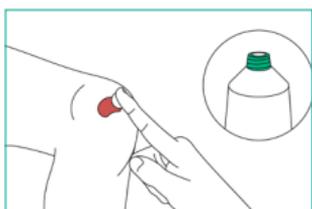

Appliquer Prontosan® acute Gel cicatrisant.

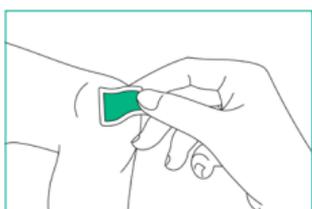

Recouvrir ensuite la plaie avec un pansement respirant.



## PRONTOSAN® EN LIGNE

Découvrez les nombreuses possibilités d'utilisation de Prontosan® Spray pour plaies et acute Gel cicatrisant, des conseils et astuces pour le traitement moderne des plaies et bien plus sur notre site [petiteplaie.ch](http://petiteplaie.ch).



## QUAND CONSULTER UN MÉDECIN?

Lorsque la plaie saigne abondamment, est profonde ou doit être recousue. Dans tous les cas lors de morsures. Renouveler éventuellement la vaccination antitétanique.