

Wundversorgung bei



Schürfwunden

- Grosse Schmutzpartikel (z.B. Kieselsteine) mit einer Pinzette entfernen
- Die Wunde mit Prontosan® Wundspray ausspülen und vom Schmutz befreien
- Danach Prontosan® acute Wundgel auftragen
- Die Wunde mit einer Wundauflage (z.B. Kompresse) abdecken



Schnittwunden

- Bei starker Verschmutzung die Wunde zuerst mit Prontosan® Wundspray reinigen
- Danach Prontosan® acute Wundgel auftragen
- Die Wunde mit einer Wundauflage (z.B. Pflaster) abdecken



Platzwunden

- Die Wunde mit Prontosan® Wundspray reinigen
- Danach Prontosan® acute Wundgel auftragen
- Die Wunde mit einer Wundauflage (z.B. Kompresse oder Pflaster) abdecken
- Bei grossen oder stark blutenden Platzwunden, die genäht werden müssen, den Arzt aufsuchen



Leichte Verbrennungen Grad 1 und 2

- Erstmassnahme: mit lauwarmem, fliessendem Leitungswasser max. 10 Minuten kühlen
- Prontosan® acute Wundgel grosszügig auftragen und gegebenenfalls mit einer beschichteten Kompresse abdecken
- Entstandene Brandblase nicht öffnen
- Auch ein Sonnenbrand kann mit Prontosan® acute Wundgel versorgt werden



Perfekt für Ihre
Erste-Hilfe-
Apotheke



www.kleinenwunden.ch

Prontosan® Wundspray Prontosan® acute Wundgel

Die schnelle Hilfe bei kleinen, akuten Wunden

Kleine Wunden – grosse Wirkung

Kleine Wunden sind schnell passiert. Wichtig ist, die akute Wunde richtig und sorgfältig zu versorgen. Dabei sind eine gründliche Wundreinigung und eine feuchte Wundbehandlung unerlässlich.

Prontosan® Wundspray und Prontosan® acute Wundgel reinigen und schützen vor möglichen Infektionen. Das Hydrogel und der Spray befeuchten die Wunde, können den Schmerz lindern und fördern dank der feuchten Wundbehandlung eine schnelle Wundheilung.

Prontosan® ist einfach in der Anwendung und die Wirksamkeit klinisch belegt.

-
- Reinigt, befeuchtet und kühlt
 - Lindert den Schmerz
 - Beugt Wundinfektionen vor
 - Minimiert die Narbenbildung
-



WUNDREINIGUNG

Erstversorgung

Verhindert Wundinfektionen



FEUCHTE WUNDBEHANDLUNG

Weiterbehandlung

Schafft ein feuchtes Wundmilieu

Nur eine saubere Wunde kann heilen!

Deshalb gehören Prontosan® Wundspray und Prontosan® acute Wundgel in jede Erste-Hilfe-Apotheke!

Versorgung kleiner, akuter Wunden



1. Wundreinigung

- Zuerst die Blutung stillen
- Grosse Fremdkörper mit einer Pinzette entfernen
- Dann zur Wundreinigung die Wunde mit Prontosan® Wund-spray ausspülen



2. Feuchte Wundbehandlung

- Prontosan® acute Wundgel auftragen
- Danach die Wunde mit einer atmungsaktiven Wundauflage abdecken

Die herkömmliche Versorgung mit Salben, Cremes oder Puder ist veraltet. Durch die Krustenbildung kann sich die Wundheilung verlangsamen und es können unschöne Narben zurückbleiben.



WANN ZUM ARZT?

Wenn die Wunde stark blutet, tief ist oder genäht werden muss. In jedem Fall bei Bisswunden. Wenn die letzte Tetanusimpfung mehr als zehn Jahre zurückliegt, sollte diese erneuert werden.