

Medicazione delle ferite per



Escoriazioni

- Rimuovere con una pinzetta le particelle di sporco di grandi dimensioni (ad es. sassolini)
- Lavare la ferita e liberarla dallo sporco con Prontosan® Spray per ferite
- Quindi applicare Prontosan® acute Gel cicatrizzante
- Coprire la ferita con una medicazione adatta (ad es. compressa)



Ferite da taglio

- Se la ferita è contaminata prima detergerla con Prontosan® Spray per ferite
- Quindi applicare Prontosan® acute Gel cicatrizzante
- Coprire la ferita con una medicazione adatta (ad es. cerotto)



Ferite lacero-contuse

- Detergere la ferita con Prontosan® Spray per ferite
- Quindi applicare Prontosan® acute Gel cicatrizzante
- Coprire la ferita con una medicazione adatta (ad es. compressa o cerotto)
- Per le ferite lacero-contuse estese o che sanguinano molto, che vanno suturate, consultare il medico



Ustioni lievi di 1° e 2° grado

- Intervento iniziale: rinfrescare sotto acqua di rubinetto corrente tiepida per max. 10 minuti
- Applicare un'abbondante quantità di Prontosan® acute Gel cicatrizzante ed eventualmente coprire con una compressa rivestita
- Non far scoppiare le vesciche formatesi
- Anche le insolazioni possono essere trattate con Prontosan® acute Gel cicatrizzante



Perfetto per la
vostra farmacia
di primo soccorso



Prontosan® Spray per ferite
Prontosan® acute Gel cicatrizzante

L'aiuto rapido per le piccole ferite acute

Piccole ferite – grande efficacia

Basta un attimo per procurarsi piccole ferite! L'importante è trattare la ferita acuta in maniera corretta e accurata. In questo senso sono indispensabili un'accurata detersione della ferita e il suo trattamento in ambiente umido.

Prontosan® Spray per ferite e Prontosan® acute Gel cicatrizzante puliscono e proteggono da possibili infezioni. L'idrogel e lo spray umettano la ferita, possono lenire il dolore e, grazie al trattamento della ferita in ambiente umido, ne favoriscono una rapida guarigione.

Prontosan® è semplice da usare e la sua efficacia è dimostrata clinicamente.

-
- Deterge, umidifica e rinfresca
 - Lenisce il dolore
 - Previene infezioni alla ferita
 - Minimizza la formazione di cicatrici
-



PULIZIA DELLE FERITE

Per il primo soccorso

Previene le infezioni delle ferite



TRATTAMENTO DELLE FERITE IN AMBIENTE UMIDO

Proseguimento del trattamento

Crea un ambiente della ferita umido

Solo una ferita pulita può guarire!

Pertanto Prontosan® Spray per ferite e Prontosan® acute Gel cicatrizzante non possono mancare in qualunque farmacia di primo soccorso!

Trattamento delle piccole ferite acute



1. Detersione della ferita

- Per prima cosa arrestare l'emorragia
- Rimuovere i corpi estranei di grandi dimensioni con una pinzetta
- Quindi detergere la ferita con Prontosan® Spray per ferite



2. Trattamento delle ferite in ambiente umido

- Applicare Prontosan® acute Gel cicatrizzante
- Quindi ricoprire la ferita con una medicazione traspirante

Il trattamento convenzionale con unguenti, creme e polveri è superato. La formazione di croste può rallentare la guarigione della ferita e possono permanere antiestetiche cicatrici.



QUANDO OCCORRE ANDARE DAL MEDICO?

Se la ferita sanguina, è profonda o deve essere suturata. In ogni caso per le ferite da morsi. Se l'ultima vaccinazione per il tetano risale a oltre dieci anni prima, va ripetuta.