

Traitement de plaies en cas de



Écorchures

- Grande partie de saletés (gravier p.ex.) à ôter avec une pincette
- Rincer la plaie avec Prontosan® Spray pour plaies et libérer de la saleté
- Ensuite appliquer Prontosan® acute Gel cicatrisant
- Recouvrir la plaie avec un pansement (compresse p.ex.)



Coupures

- Nettoyer d'abord la plaie avec Prontosan® Spray pour plaies en cas de fortes salissures
- Appliquer ensuite Prontosan® acute Gel cicatrisant
- Recouvrir la plaie avec un pansement (sparadrap p.ex.)



Déchirures

- Nettoyer la plaie avec Prontosan® Spray pour plaies
- Appliquer ensuite Prontosan® acute Gel cicatrisant
- Recouvrir la plaie avec un pansement (compresse ou sparadrap p.ex.)
- En cas de déchirures importantes ou saignantes, qui doivent être suturées, consulter un médecin



Légères brûlures des 1^{er} et 2^e degrés

- Première mesure : rafraîchir pendant 10 minutes au max. à l'eau courante tiède
- Appliquer abondamment Prontosan® acute Gel cicatrisant et recouvrir d'une compresse enduite si nécessaire
- Ne pas percer les ampoules existantes
- Un coup de soleil peut aussi être traité avec Prontosan® acute Gel cicatrisant



Parfait pour
votre pharma-
cie de premier
secours



Prontosan® Spray pour plaies Prontosan® acute Gel cicatrisant

L'aide rapide en cas de petites plaies aiguës

Petites plaies – grands effets

Les petites blessures arrivent très vite ! L'important est de traiter une plaie aiguë correctement et soigneusement.

Pour cela, un nettoyage de plaie approfondi et un traitement de plaie humide sont indispensables. Prontosan® Spray pour plaies et Prontosan® acute Gel cicatrisant nettoient et protègent de possibles infections. L'hydrogel et le spray humidifient la plaie, peuvent apaiser les douleurs et aident à une guérison rapide, grâce au traitement de plaie humide.

Prontosan® est d'utilisation facile et son efficacité prouvée cliniquement.

-
- Nettoie, humidifie et rafraîchit
 - Apaise la douleur
 - Prévient les infections
 - Réduit la formation de cicatrices
-



NETTOYAGE DE LA PLAIE

Premiers soins

Empêche les infections de plaies



TRAITEMENT DES PLAIES

EN MILIEU HUMIDE

Suite du traitement

Confère un milieu humide de la plaie

Seule une plaie propre peut guérir !

Voilà pourquoi Prontosan® Spray pour plaies et Prontosan® acute Gel cicatrisant ont leur place dans chaque pharmacie de premier secours !

Traitement de plaies petites et aiguës



1. Nettoyage de plaie

- D'abord arrêter le saignement
- Ôter les grands corps étrangers avec une pincette
- Rincer ensuite pour le nettoyage de la plaie avec Prontosan® Spray pour plaies



2. Traitement humide de plaie

- Appliquer Prontosan® acute Gel cicatrisant
- Recouvrir ensuite la plaie avec un pansement respirant

Le traitement habituel avec des pommades, crèmes ou poudres est passé de mode. Par la formation de croûtes, la guérison de la plaie peut être ralentie et des cicatrices peu esthétiques peuvent en résulter.



QUAND CONSULTER UN MÉDECIN ?

Lorsque la plaie saigne, est profonde ou doit être recousue. Dans tous les cas lors de morsures. Lorsque le dernier vaccin antitétanique a dépassé dix ans, il devrait être renouvelé.