




Histoacryl[®] Octyl

GEWEBEKLEBER AUS 2-OCTYL-CYANOACRYLAT
MIT HOHER VISKOSITÄT


ANWENDUNG




- Hohe Viskosität (1)
- Mikrobielle Barriere (1)
- Transparente, abgewinkelte Spitze

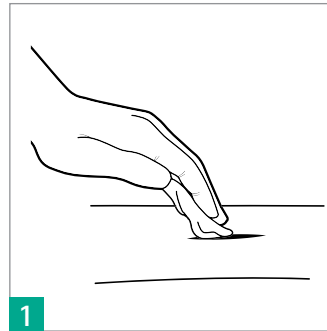


Die Inzision oder Traumabereich muss sauber und trocken sein, bevor der Kleber aufgetragen wird. Wundränder sollten leicht adaptiert sein.

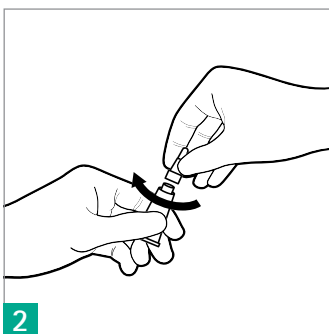

Die Applikatortspitze im Uhrzeigersinn auf das Tubengebinde aufschrauben, bis diese fest auf der Tube sitzt. Die Folienmembran wird dadurch durchstossen.

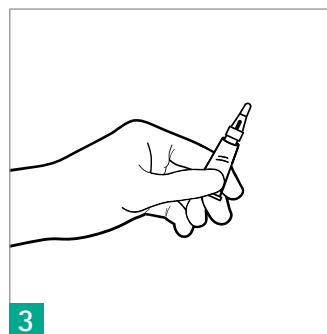


Tube horizontal bzw. nach unten halten und am Ende vorsichtig zusammendrücken. Klebstoff nach oben drücken bis dieser an der Spitze sichtbar ist.

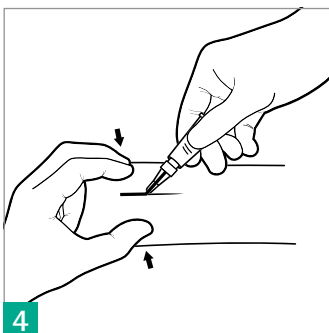

Wundränder adaptieren, Tube leicht zusammendrücken und den Kleber auf der Wunde verteilen. Halten der Wundränder für ca. 30 Sek. bis der Kleber haftet.

Auf eine glatte und gleichmässige Klebeschicht achten.

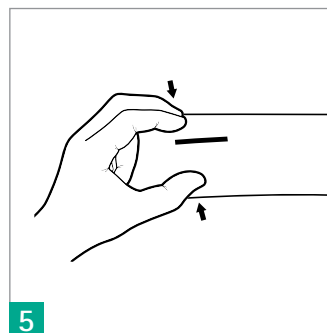

Sobald der Kleber vollständig polymerisiert (nicht mehr klebrig) ist, kann die Wunde mit einem weiteren Verband abgedeckt werden.

BEZEICHNUNG	INHALT	ART.-NR.
Histoacryl® Octyl Micro 0,5 ml	10 Tuben	10520000
Histoacryl® Octyl 1 ml	10 Tuben	10520010

(1) Instructions for Use Histoacryl® Octyl Micro/Histoacryl® Octyl