




Histoacryl® Octyl

LA SOLUTION POUR LA FERMETURE
DES PLAIES

Instructions d'utilisation




- Haute viscosité (1)
- Barrière microbienne (1)
- Embout coudé transparent

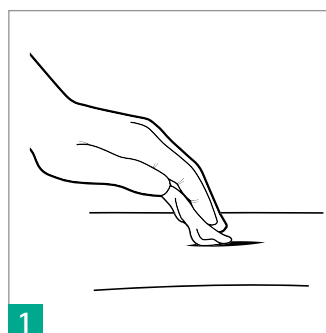


Le site traumatique ou d'incision doit être propre et sec avant d'appliquer la colle. Assurez-vous que les bords de la plaie puissent être aisément rapprochés.

1

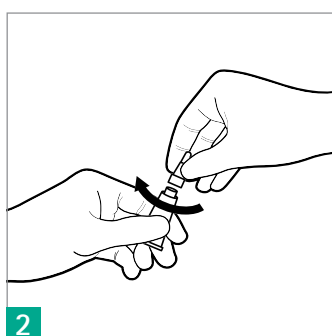


Vissez l'embout applicateur sur le tube fileté dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'applicateur soit solidement fixé au tube. L'opercule est ainsi percée.

2

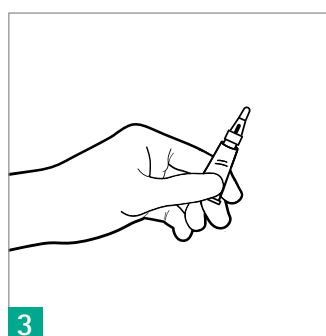

Tenez le tube à l'horizontale ou vers le bas et pressez-le délicatement à l'extrémité pour faire remonter la colle jusqu'à ce que celle-ci soit visible dans l'embout.


3

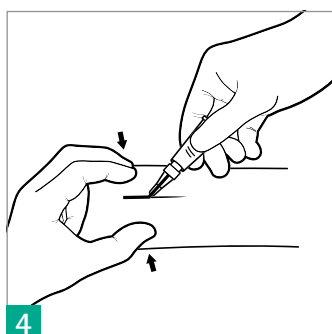

Rapprochez les bords de la plaie, pressez légèrement le tube et répartissez la colle sur la plaie. Maintenez les bords de la plaie pendant env. 30 secondes jusqu'à ce que la colle prenne.

4

Faites en sorte d'appliquer une couche de colle lisse et régulière.

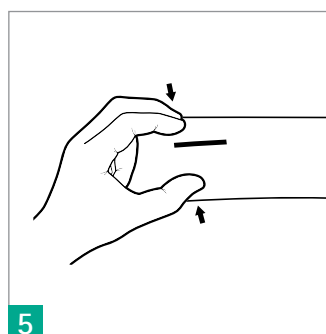

Une fois que la colle est complètement polymérisée (plus d'aspect visqueux), la plaie peut être couverte avec un bandage.

5

| DESCRIPTION | QUANTITÉ | CODE |
|--------------------------------|----------|----------|
| Histoacryl® Octyl 1 ml | 10 tubes | 10520010 |
| Histoacryl® Octyl Micro 0.5 ml | 10 tubes | 10520000 |

(1) Instructions d'utilisation Histoacryl® Octyl Micro/Histoacryl® Octyl