



EINSATZGEBIETE

- Dekubitalucera
- Diabetische Fussulcera
- Chirurgische Wunden

Askina® DresSil Heel

DER SILIKONBESCHICHTETE SCHAUMSTOFFVERBAND
MIT HAFTRAND FÜR DIE FERSE

Askina® DresSil Heel

Der silikonbeschichtete Schaumstoffverband mit Haftrand für die Ferse




- 1 Silikon-Haftfläche
- 2 Silikon-Haftrand
- 3 Polyurethan-Schaum
- 4 Polyurethan-Film

VORTEILE

- Optimal zur Versorgung von Wunden im Bereich der Ferse sowie des Innen- und Aussenknöchels
- Sichere und hautschonende Hafteigenschaften durch Silikonbeschichtung
- Druckentlastende Eigenschaften des Polyurethan-Schaums können der Entstehung von Wunden vorbeugen
- Einfaches und schnelles Anlegen und Entfernen
- Sehr gutes Exsudat-Management

IN WENIGEN SCHRITTEN ZUM ZIEL

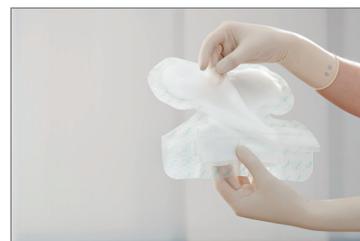

Ziehen Sie die obere Schutzfolie ab



Platzieren Sie die Ferse oberhalb der unteren Schutzfolie auf dem Verband



Modellieren Sie den Verband an Innen- und Aussenknöchel an und lösen Sie die untere Schutzfolie



Modellieren Sie den Verband abschliessend an die Ferse. Fertig!

PRODUKTÜBERSICHT

Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode	MiGeL
Askina® DresSil Heel 22 x 21.6 cm	5	5592205	6395005	35.05.03.11.1

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com