



DOMAINES D'UTILISATION

- Escarres de décubitus
- Ulcères du pied diabétique
- Plaies chirurgicales

Askina[®] DresSil Heel

LE PANSEMENT MOUSSE REVÊTU D'UNE COUCHE DE SILICONE
AVEC BORD ADHÉRENT POUR LE TALON

Askina® DresSil Heel

Le pansement mousse revêtu d'une couche de silicone avec bord adhérent pour le talon




- 1 Surface adhérente en silicone
- 2 Bord adhérent en silicone
- 3 Mousse de polyuréthane
- 4 Film de polyuréthane

AVANTAGES

- Optimal pour le traitement de plaies dans la zone du talon ainsi que de la malléole interne et externe
- Propriétés d'adhésion sûres et protectrices de la peau grâce au revêtement en silicone
- Les propriétés de la mousse en polyuréthane réduisent la pression et diminuent le risque de plaies
- Pose et enlèvement faciles et rapides
- Excellent traitement de l'exsudat

PRÊT À L'EMPLOI EN PEU D'ÉTAPES

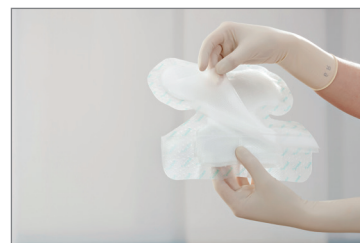

Retirez le film de protection supérieur



Placez le talon au-dessus du film protecteur inférieur sur le pansement



Modelez le pansement sur la malléole interne et externe et ôtez le film de protection inférieur



Modelez le pansement sur le talon pour terminer. C'est fini !

SURVOL DU PRODUIT

Article	Unité	N° art.	Pharma-code	LiMA
Askina® DresSil Heel 22 x 21.6 cm	5	5592205	6395005	35.05.03.11.1

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market : Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com