



CAMPI D'IMPIEGO

- Ulcere da decubito
- Ulcere del piede diabetico
- Ferite chirurgiche

Askina® DresSil Heel

LA MEDICAZIONE IN ESPANSO CON RIVESTIMENTO
IN SILICONE E BORDO ADESIVO PER IL TALLONE

Askina® DresSil Heel

La medicazione in espanso con rivestimento in silicone e bordo adesivo per il tallone




- 1 Superficie adesiva in silicone
- 2 Bordo adesivo in silicone
- 3 Espanso poliuretano
- 4 Film poliuretano

VANTAGGI

- Ideale per il trattamento delle ferite nella zona del tallone e del malleolo interno ed esterno
- Proprietà adesive sicure e delicate grazie al rivestimento in silicone
- Le proprietà di scarico della pressione dell'espanso poliuretano sono in grado di prevenire la formazione di piaghe
- Applicazione e rimozione semplici e rapide
- Ottima gestione dell'essudato

AL TRAGUARDO IN POCHI PASSAGGI

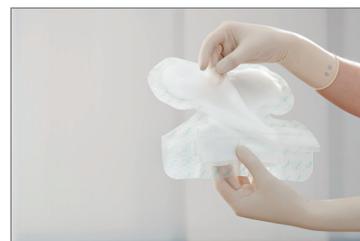

Staccare il film protettivo superiore



Posizionare il tallone sulla medicazione, sopra al film protettivo inferiore



Modellare la medicazione sul malleolo interno ed esterno e staccare il film protettivo inferiore



Infine modellare la medicazione sul tallone. Finito!

PANORAMICA DEI PRODOTTI

Articolo	Unità	Cod. art.	Pharma-code	EMAp
Askina® DresSil Heel 22 x 21.6 cm	5	5592205	6395005	35.05.03.11.1

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com