

Prontosan®

RACCOMANDAZIONE PER L'USO

ASSORTIMENTO

Prodotto	Sterile	Galenico	Campo d'impiego	Indicazioni
Prontosan® Soluzione detergente per ferite	Sì	Soluzione pronta all'uso	Detersione, lavaggio, umettamento e decontaminazione, rimozione di biofilm	Per la pulizia di tutte le ferite croniche
Prontosan® Wound Gel	Sì	Idrogel fluido	Per ferite con patina, rimozione di biofilm e decontaminazione	Per ferite piccole, profonde e frastagliate e ustioni di grado 1 e 2
Prontosan® Wound Gel X	Sì	Idrogel denso	Per ferite con patina, rimozione di biofilm e decontaminazione	Per ferite grandi e superficiali e ustioni di grado 1 – 3

COMPONENTI

Componenti	Descrizione
Poliesanide (PHMB) (poliesametilene biguanide)	Sostanza antimicrobica, inibisce la crescita dei microorganismi e riduce la patina, efficace su batteri gram-positivi e gram-negativi (MRSA, Pseudomonas aeruginosa e <i>S. aureus</i>), combatte i cattivi odori causati dai batteri
Betaina (undecilenamidopropil-betaina)	Tensioattivo eccezionalmente ben tollerato, disgrega il biofilm e scioglie le patine, riduce la contaminazione della superficie della ferita da batteri e detriti cellulari, prevenzione della formazione di biofilm
Altri componenti	Aqua purificata, glicerolo, idrossietilcellulosa (nei gel)
Resistenze	Non sono note resistenze



USO

Indicazione	Descrizione
A ogni cambio di medicazione	<ol style="list-style-type: none">1. Lavare con Prontosan® Soluzione detergente per ferite.<ul style="list-style-type: none">→ Lavaggio per ferite contaminate→ Fase umida-secca per ferite colonizzate e con colonizzazione critica2. Applicare sulla base della ferita Prontosan® Wound Gel o Prontosan® Wound Gel X, in questo modo si evita che si formi nuova fibrina.
Uso a supporto della terapia a pressione negativa	Il lavaggio con Prontosan® Soluzione detergente per ferite si è dimostrato valido nella terapia a pressione negativa.
Pratico da usare	Prontosan® Wound Gel o Prontosan® Wound Gel X rimane sulla superficie della ferita fino al successivo cambio di medicazione.
Limitazione dell'uso	Prontosan® è compatibile con tutte le comuni medicazioni per ferite (incluse quelle all'argento). Prontosan® non deve essere mescolato con altre sostanze antisettiche o detergenti per ferite. Ad esempio è controindicato mescolarlo con PVP iodio o combinarlo con enzimi, unguenti, oli o saponi.
Ferite con biofilm, patina di fibrina o necrosi	<ol style="list-style-type: none">1. Intridere delle compresse di ovatta con Prontosan® Soluzione detergente per ferite fino a saturazione e applicare generosamente sulla ferita e sulla cute perilesionale. Il tempo di azione antimicrobico è per Prontosan® di max. 1 minuto. Il tensioattivo, che rompe il biofilm, necessita tuttavia di un tempo di contatto. L'efficacia del tempo di contatto aumenta con la sua durata. Per le patine spesse consigliamo un tempo di contatto di 10 – 15 minuti, per quelle più piccole anche meno. Quindi rimuovere la patina sciolta con una pinzetta sterile o un batuffolo di ovatta.2. Applicare Prontosan® Wound Gel o Prontosan® Wound Gel X direttamente sulla superficie o nelle cavità della ferita. Coprire con una medicazione secondaria.
Ferite profonde	Adatto anche per ferite profonde.
Ustioni	Prontosan® Wound Gel può essere usato per ustioni di grado da 1 a 2. Prontosan® Wound Gel X può essere usato per ustioni di grado da 1 a 3.
Durata d'uso	La durata d'uso di Prontosan® è illimitata.
Conservabilità	La conservabilità dopo l'apertura è di 8 settimane.