

Aesculap® AdTec® monopolar

Anleitung zur Demontage und Montage



Aesculap Endoscopic Technology

Vertrieb Österreich

B. Braun Austria GmbH | Aesculap Division | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf
Tel. +43 2236 4 65 41-0 | Fax +43 2236 4 65 41-177 | www.bbraun.at

Vertrieb Schweiz

B. Braun Medical AG | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tel. +41 58 258 50 00 | Fax +41 58 258 60 00 | www.bbraun.ch

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
Tel. (0 74 61) 95-0 | Fax (0 74 61) 95-26 00 | www.aesculap.de

Aesculap – a B. Braun company

Die Hauptproduktmarke 'Aesculap' und die Produktmarke 'AdTec' sind eingetragene Marken der Aesculap AG.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Prospekt Nr. C22201

0111/1.0/2




DEMONTAGE




1. Sperre am Sperregriff deaktivieren
 Roten Kippschalter nach vorne umlegen.
Beachte: Betrifft nur P0959R.




2. Schaft und Griff trennen
 Drehstern nach hinten schieben bis er einrastet. Ein roter Ring wird sichtbar.
Wichtig: Bewegliches Griffteil nicht festhalten.

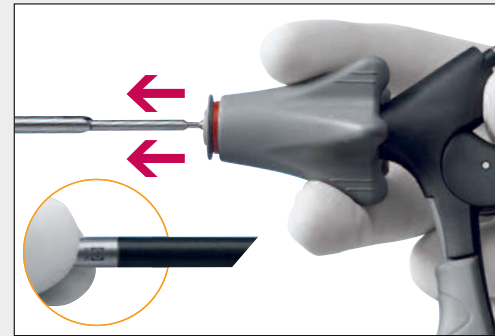

3. Schaft aus Griff entnehmen
 Mauleinsatz an Spitze festhalten und aus dem Griff ziehen.

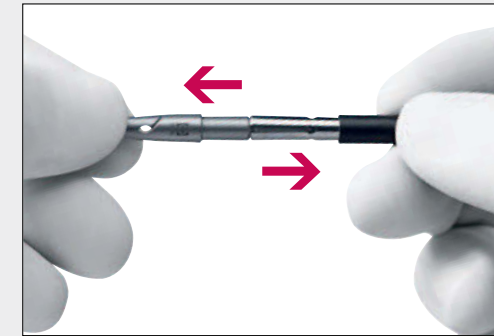


4. Schaft demontieren I
 Mauleinsatz an Spitze festhalten und schwarzes Außenrohr abziehen.

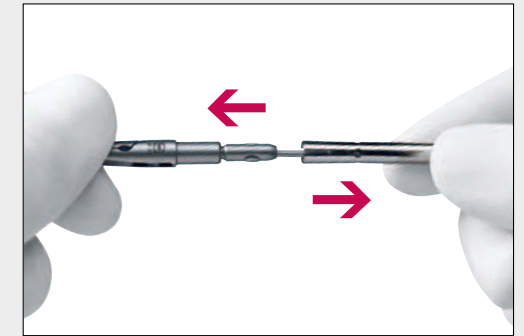


5. Schaft demontieren II
 Mauleinsatz an Spitze festhalten und Metall-Innenrohr abziehen.


MONTAGE

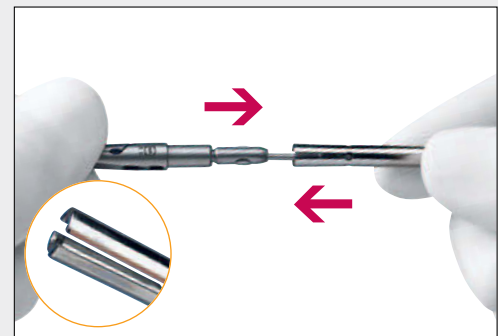


1. Schaft montieren I
 Metall-Innenrohr mit den vier Federungen in Richtung Arbeitsende auf den Mauleinsatz aufschieben bis die Federungen einrasten.

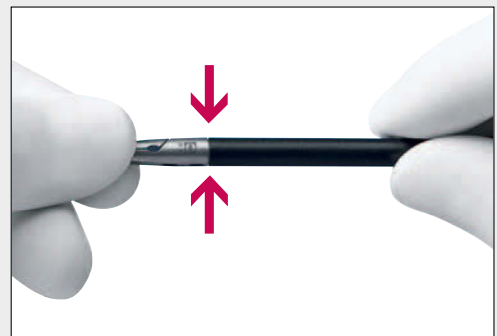

2. Schaft montieren II
 Schwarzes Außenrohr bis zum Anschlag über das Innenrohr auf den Mauleinsatz schieben.

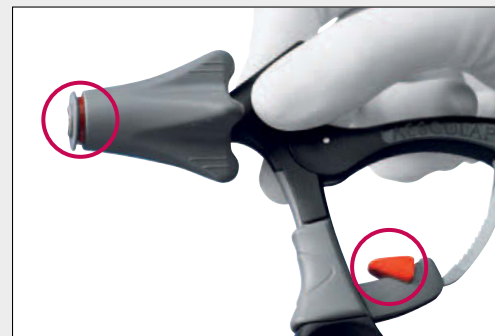

3. Vorbereitung Handgriff
 Falls roter Ring nicht sichtbar, Drehstern nach hinten schieben. Sperre deaktivieren, indem der rote Kippschalter nach vorne umgelegt wird.
Beachte: Betrifft nur P0959R.

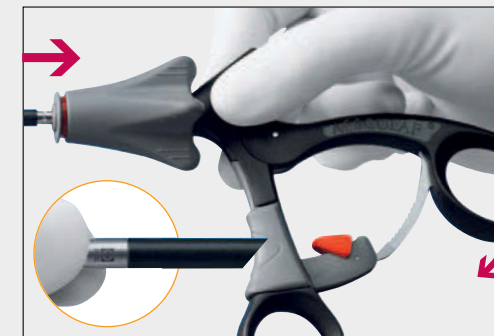

4. Schaft und Griff zusammensetzen
 Schaft an Spitze und Griff hinter Drehstern festhalten. Schaft in den Griff schieben bis er einrastet und der rote Farbring verschwindet.
Wichtig: Das bewegliche Griffteil nicht festhalten.



5. Funktionstest
 Den Griff öffnen und schließen, dabei überprüfen ob sich die Maulteile öffnen und schließen.

PFLEGE



Instrumente nach jeder Reinigung mit Aesculap Sterilit an den definierten Stellen (Maulteil und roter Schalter) ölen.



- 1 Kippschalter
- 2 Drehstern
- 3 Bewegliches Griffteil



AUFBEREITUNG & ZUBEHÖR

- Kontaminiertes Produkt schnellstmöglich aufbereiten
- Das Produkt kann sowohl im zerlegten als auch zusammengebauten Zustand sterilisiert werden
- Für Hinweise zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung
- Aktuelle Informationen zur Aufbereitung siehe auch Aesculap Extranet unter www.aesculap-extra.net
- Zubehör und Ersatzteile siehe Prospekt C766 oder unter www.endoskopie-katalog.de

REPARATUR

Reparaturen dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die von Aesculap hierzu ermächtigt wurden. Nur so bleiben Garantie und Gewährleistungsansprüche uneingeschränkt erhalten.
 Bei Reparaturen einschicken an:
 Aesculap Technischer Service
 Am Aesculap-Platz
 D-78532 Tuttlingen.
 Weitere Serviceadressen erfahren Sie über die oben genannte Adresse und über ats@aesculap.de