



EINSATZGEBIETE

- Nicht exsudierende Wunden:
 - Chirurgische Wunden
 - Akute Wunden
 - Chronische Wunden
- Fixierung von Primärverbänden

Askina[®] Derm

DÜNNER, TRANSPARENTER FOLIENVERBAND

Askina® Derm

ZUM SCHUTZ ODER ZUR FIXATION

Der semipermeable, sterile Folienverband aus Polyurethan schützt trockene Wunden bei gleichzeitiger visueller Kontrolle. Akute wie chirurgische Wunden sind sicher versorgt.


ANWENDUNG



Bedrucktes Schutzpapier von der klebenden Seite des Verbands entfernen



Verband mit der klebenden Seite nach unten über der Wunde positionieren und sanft andrücken

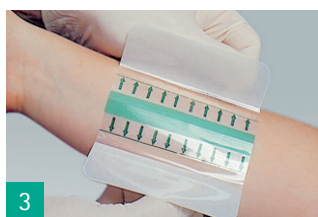

Seitliche Schutzfolie langsam mit beiden Händen entfernen und Verband mit abrollenden Bewegungen auf der gesunden Haut festdrücken



Nach Befestigung des Verbands Trägerfolie mit grünen Pfeilen in Pfeilrichtung entfernen

VORTEILE

- Polyurethan-Film, undurchlässig für Flüssigkeiten und Bakterien – **hoher Infektionsschutz**
- Hohe Luft- und Wasserdampf-Durchlässigkeit – **keine Mazeration** bei Aufrechterhaltung des feuchten Wundmilieus
- Hypoallergener Acrylatkleber – **leicht ablösbar, gut verträglich**
- Transparent – **ermöglicht visuelle Kontrolle**
- Ausgesprochen dünn – **bequem**, passt sich der Morphologie an
- **Einfache und sichere Handhabung** – sichere Fixation auch an schwierigen Körperstellen

PRODUKTÜBERSICHT

Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode	MiGeL
6 x 7 cm	100	F72033	2600388	35.05.10.01.1
10 x 12 cm	50	F72036	2600359	35.05.10.03.1
15 x 20 cm	10	F72038	2600371	35.05.10.05.1

B. Braun Medical AG | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com