



**DOMAINES D'APPLICATION**

- Plaies non exsudatives telles que :
  - Plaies chirurgicales
  - Plaies aiguës
  - Plaies chroniques
- Fixation de pansement primaire

**Askina<sup>®</sup> Derm**

PANSEMENT FILM MINCE ET TRANSPARENT

# Askina® Derm

## COMME PROTECTION OU COMME FIXATION

Pansement film en polyuréthane, stérile et semi-perméable. Protège les plaies sèches avec contrôle visuel simultané. Les plaies aiguës et chirurgicales sont traitées avec sécurité.


### MODE D'EMPLOI



Détacher le papier de protection imprimé de la surface adhésive du pansement



Placer et presser doucement le pansement sur la plaie, avec la partie adhésive vers le bas

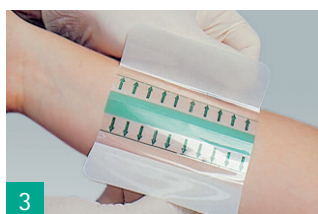

Détacher lentement avec les deux mains, la feuille de protection latérale et appliquer fortement le pansement sur la peau saine



Après la fixation du pansement, détacher les feuilles de support dans la direction des flèches

### AVANTAGES

- Film de polyuréthane imperméable aux liquides et bactéries – **haute protection contre l'infection**
- Haute perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau – **pas de macération** lors de la maintenance en milieu humide de la plaie
- Colle d'acrylate hypoallergène – **s'enlève facilement, bonne tolérance**
- Transparent – **permet un contrôle visuel**
- Extrêmement fin – **pratique, s'adapte à la morphologie**
- **Maniement simple et sûr** – fixation sûre, également aux parties du corps difficiles

### SURVOL DES PRODUITS

Article	Unité	N° art.	Pharmacode	LiMA
6 x 7 cm	100	F72033	2600388	35.05.10.01.1
10 x 12 cm	50	F72036	2600359	35.05.10.03.1
15 x 20 cm	10	F72038	2600371	35.05.10.05.1

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)  
Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | [sales-hospital.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-hospital.bbmch@bbraun.com)  
Out Patient Market : Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | [sales-opm.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-opm.bbmch@bbraun.com)