



CAMPI D'IMPIEGOE

- Ulcere flebopatiche
- Ulcere diabetiche
- Decubito
- Ascessi
- Fistole / cavità di ferite
- Ustioni
- Punti di prelievo cutanei
- Ferite infette

Askina® Sorb

ALGINATO DI CALCIO PER LE FERITE ESSUDANTI

Askina® Sorb

ASSORBIMENTO ECCELLENTE CON PROTEZIONE OTTIMALE DEI BORDI DELLE FERITE

La composizione ideale di Askina® Sorb con alginato di calcio all'85% ed il 15% di carbossimetilcellulosa (CMC) abbina un assorbimento ottimale alla contemporanea protezione dalla macerazione dei bordi della ferita.

VANTAGGI

- è adatta alla ferita
- Assorbe rapidamente l'essudato in eccesso
- Protegge i bordi della ferita dalla macerazione
- Favorisce la naturale guarigione della ferita
- Grazie alla gelificazione permette cambi di medicazione atraumatici ed indolori
- Può essere rimosso in un unico pezzo




USO



1 L'adattabilissimo Askina® Sorb in compressa o tampone può essere applicato sulla ferita in tutta semplicità.



2 Riempire la ferita con Askina® Sorb in modo che non risulti troppo pressata.

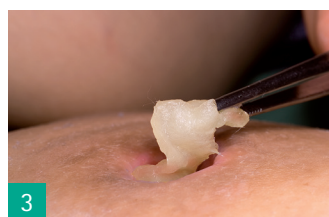

3 Grazie alla capacità di assorbimento ed alla stabilità ottimali, Askina® Sorb può essere rimosso particolarmente bene in un unico pezzo.

PANORAMICA DEI PRODOTTI

Articolo	Unità	Cod. art.	Pharmacode	EMAp
Askina® Sorb compressa				
6 x 6 cm	15	2100S	2753703	35.05.06.01.1
10 x 10 cm	15	2101S	2753726	35.05.06.02.1
Askina® Sorb tampone				
2.7 x 34 cm	10	2105S	2753732	35.05.06.08.1

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com