

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


POUR SURFACES
MÉTALLIQUES
BRILLANTES



Meliseptol® New Formula

DÉSINFECTANT ALCOOLIQUE RAPIDE



Meliseptol® New Formula

VUE D'ENSEMBLE

- Désinfectant alcoolique prêt à l'emploi
- Particulièrement adapté aux surfaces métalliques brillantes
- Agréable odeur d'agrumes
- Sans microbicides ajoutés (tels qu'aldéhydes ou composés d'ammoniums quaternaires)
- Action rapide: 1 min. DGHM¹⁾/VAH²⁾ ou norovirus en 30 sec.
- Listage: DGHM¹⁾/VAH²⁾ et sur la liste des virucides de l'IHO³⁾

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Humecter l'intégralité des surfaces avec Meliseptol® New Formula et étaler avec un chiffon. Respecter le temps d'action. Ne pas frotter les surfaces pour les sécher.

Article	N° art.	Pharmacode
Flacon rond 250 ml	19762	6444749
Flacon spray 250 ml	19763	6380908
Flacon oval 1000 ml	19761	6444755
Flacon spray 1000 ml*	19764	6380914
Bidon 5 litres	19758	6380877

* Pistolet vaporisateur est vendu séparément (N° art. 6510094)

SPECTRE D'ACTION / DURÉES D'ACTION (DA)

Domaine d'utilisation	DA
Désinfection des surfaces pour la prévention des infections hospitalières et la désinfection routinière (selon DGHM ¹⁾ /VAH ²⁾)	1 min.*
Action virucide limitée (γ compris VHB/VHC/VIH) ⁴⁾ Virus de la vaccine, BVDV ⁵⁾	30 sec.
Mycobactéricide / tuberculocide	1 min.
Rotavirus	30 sec.
Adénovirus	30 sec.
Norovirus**	30 sec.

* La valeur de listage la plus courte possible est de 5 min. pour VAH.

** Modèle NVM



En base purement d'éthanol

Données physico-chimiques

Aspect : liquide transparent | Aspect : liquide transparent | Valeur pH : env. 7.0
Point d'inflammation : + 31 °C | Densité : 0.91 g / ml à 20 °C

Meliseptol® New Formula

100 g de solution contiennent : 44,0 g d'éthanol

Indications selon le règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents : < 5% de surfactants amphotériques, parfum. Indications selon le règlement sur les substances dangereuses : inflammable. Ne pas vaporiser sur une flamme ouverte ! Tenir le contenant fermé hermétiquement. Tenir éloigné de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Tenir hors de portée des enfants. L'association professionnelle prescrit le port de gants de protection lors de l'utilisation de désinfectants non destinés à être utilisés sur la peau. Point éclair : 31 °C selon la norme DIN 51755. Application max. de 50 ml/m².

Avvertissements

Utiliser les désinfectants en toute sécurité. Toujours lire l'étiquetage et les informations sur le produit avant toute utilisation.

1) DGHM = Société allemande de l'hygiène et de la microbiologie (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie)

2) VAH = Association pour l'hygiène appliquée (Verband für Angewandte Hygiene)

3) www.iho-viruzidie-liste.de

4) Selon les recommandations de l'Institut Robert Koch, Bundesgesundheitsblatt 01-2004

5) BVDV = Virus de la diarrhée virale bovine

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market : Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com