



PER SUPERFICI
METALLICHE
LUCIDE



Meliseptol® New Formula

DISINFEZIONE RAPIDA ALCOLICA



Meliseptol® New Formula

A COLPO D'OCCHIO

- Disinfettante alcolico pronto all'uso
- Particolarmente adatto per superfici metalliche lucide
- Gradevole profumo di agrumi
- Privo di additivi microbici (es. aldeidi, QAC)
- Efficace in tempi rapidi: 1 min. DGHM¹⁾/VAH²⁾ o norovirus in 30 sec.
- Inclusione negli elenchi: DGHM¹⁾/VAH²⁾ ed elenco dei virucidi dell'IHO³⁾

AVVERTENZE PER L'USO

Inumidire completamente la superficie con Meliseptol® New Formula e distribuire con un panno. Osservare il tempo di contatto. Le superfici non vanno strofinate asciutte.

Articolo	Art. n.	Pharmacode
Flacone rotondo 250 ml	19762	6444749
Flacone spray 250 ml	19763	6380908
Flacone ovale 1000 ml	19761	6444755
Flacone spray 1000 ml*	19764	6380914
Tanica 5 l	19758	6380877

* Pistola a spruzzo venduta separata (Art. n. 6510094)

SPETTRO D'AZIONE / TEMPI D'AZIONE (TA)

Ambito d'uso	TA
Disinfezione delle superfici per la profilassi delle infezioni ospedaliere e nella pratica generale (conformemente a DGHM ¹⁾ /VAH ²⁾)	1 min.*
Limitatamente virucida (compresi HBV, HCV, HIV ⁴⁾ , Virus vaccinici, BVDV ⁵⁾)	30 sec.
Micobattericida/tubercolicida	1 min.
Rotavirus	30 sec.
Adenovirus	30 sec.
Norovirus**	30 sec.

* Il valore più breve possibile elencato dal VAH è di 5 min.

** Virus modello MNV



A base di etanolo

Dati fisico-chimici

Aspetto: liquido limpido | Odore: simile all'alcool | Valore pH: ca. 7.0
Punto di infiammabilità: + 31 °C | Densità: 0.91 g/ml a 20 °C

Avvertenze:

Utilizzare il disinfettante con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre il nome e le informazioni sul prodotto.

Meliseptol® New Formula

100 g di soluzione contengono: etanolo 44.0 g
Informazioni in conformità al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi: < 5% tensioattivi anfoteri, profumo. Informazioni in conformità al regolamento relativo alle sostanze pericolose: infiammabile. Non spruzzare su fiamme libere! Conservare il contenitore chiuso ermeticamente. Tenere lontano da fonti di accensione. Non fumare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. L'istituto di previdenza contro gli infortuni sul lavoro prescrive di indossare guanti di protezione quando si utilizzano disinfettanti non formulati per uso cutaneo. Punto di infiammabilità 31 °C conformemente alla norma DIN 51755. Spargimento max. 50 ml/m².

1) DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (Società tedesca di igiene e microbiologia)

2) VAH = Verbund für Angewandte Hygiene (Associazione per l'igiene applicata)

3) www.iho-viruzidie-liste.de

4) conform. alla raccomandazione dell'RKI, Bundesgesundheitsblatt 01-2004

5) BVDV = Virus della diarrea virale bovina

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com