



Prontoderm[®] C

Die antimikrobielle Lösung zur Reinigung von Katheter-Eintrittspforten

Prontoderm® C

Für den wiederholten und langfristigen Gebrauch


Ihre Vorteile

- Unterstützend bei der Vorbeugung von Harnwegsinfekten
- Hervorragende Haut- und Schleimhautverträglichkeit
- Schleimhäute trocknen nicht aus
- Gebrauchsfertig, praktisch und schnell zur Hand
- Keine Irritationen und kein Brennen

Anwendung



Kompressen/Tupfer gut benetzen

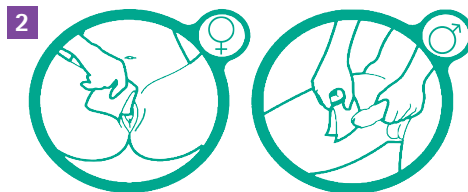

- Katheter-Eintrittspforte mit getränktem Tupfer oder Komresse reinigen
- Von der Innenseite nach Aussen vorgehen
- Mind. 1 Minute einwirken lassen, muss nicht abgewaschen werden

Produktinformationen

Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode
75 ml	1	400195	7196331
500 ml	1	400196	7345268

Ingredients Prontoderm® C

Aqua, Undecylenamidopropyl Betaine, Polyaminopropyl Biguanide (Polyhexanide)
Geprüft nach EN 12054 und EN 1499 | 8 Wochen nach Anbruch aufzubrauchen

