



Prontoderm[®] C

La solution antimicrobienne pour le nettoyage des voies d'introduction de cathéters

Prontoderm® C

Pour une utilisation répétée et à long terme

Vos avantages

- Soutien dans la prévention des infections des voies urinaires
- Excellente tolérance de la peau et des muqueuses
- Les muqueuses ne dessèchent pas
- Prêt à l'emploi, pratique et rapidement en main
- Ni irritations ni brûlures

Utilisation



Bien humidifier les compresses/tampons



- Nettoyer la voie d'introduction du cathéter avec un tampon ou une compresse imbibée
- Procéder de l'intérieur vers l'extérieur
- Laisser agir pendant 1 minute au moins, ne doit pas être rincé

Informations produit

Article	Unité	N° art.	Pharmacode
75 ml	1	400195	7196331
500 ml	1	400196	7345268

Ingredients Prontoderm® C

Aqua, Undecylenamidopropyl Betaine, Polyaminopropyl Biguanide (Polyhexanide)
Testé selon EN 12054 et EN 1499 | Utiliser jusqu'à 8 semaines après l'ouverture

