



- Technologie microfibre
- Action rapide et protection des tissus
- Pour un lit et un environnement de la plaie propres
- Elimine les dépôts, les germes et le biofilm
- Absorbe l'exsudat de la plaie
- Préserve le tissu intact
- Utilisation peu douloureuse

Prontosan® Debridement Pad

NETTOYAGE DES PLAIES EFFICACE ET DOUX

Prontosan® Debridement Pad

NETTOYAGE DES PLAIES EFFICACE ET DOUX


Prontosan® Debridement Pad a été développé en tant que composant apportant un soutien mécanique au système de nettoyage Prontosan®.

La compresse se compose d'une face nettoyante en microfibres et d'une face absorbante. La face en microfibres élimine les dépôts, les germes et le biofilm tandis que l'excédent d'exsudat est stocké sur la face extérieure absorbante.

Lorsqu'une phase d'imprégnation préalable appropriée est respectée, la compresse obtient de bons résultats même en cas de croûtes et de dépôts nécrotiques. Les produits Prontosan® Solution de rinçage de plaies ou Prontosan® Wound Gel / Prontosan® Wound Gel X sont particulièrement adaptés à cette fin.

FONCTIONNEMENT

Les microfibres sont capables d'accrocher les plus petites particules microscopiques et de les enlever du lit de la plaie. A l'inverse, les monofilaments sont des structures très grossières qui ne sont pas en mesure de capturer les particules mais seulement de les « balayer ». Les microfibres fonctionnent grâce à des forces adhésives qui attirent la particule, la capturent dans leur structure et exercent ainsi une action de nettoyage aussi douce qu'efficace. Le grand nombre de fibres garantit une grande capacité de capture.

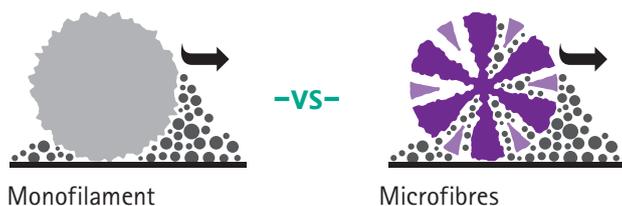

Monofilament

Microfibres

UTILISATION

La face non imprimée de la compresse doit être imbibée avec 15 à 20 ml de Prontosan® Solution de rinçage de plaies*. Ceci peut être réalisé dans l'emballage blister. Ensuite, nettoyer la surface de la plaie avec la face imbibée en exerçant une légère pression et en décrivant des mouvements circulaires.

Après ce processus de nettoyage, il est recommandé de procéder à un nouveau rinçage avec Prontosan® Solution de rinçage de plaies* afin d'éliminer les dépôts résiduels détachés.

Il convient de veiller à ce que la compresse ne soit touchée qu'au niveau de ses marges latérales et au niveau de la face imprimée, conformément à la technique « non-touch ». La plaie ne doit pas être touchée avec les mains.



Le côté le plus large de la compresse doit être utilisé pour le nettoyage global.



Le côté pointu permet de nettoyer les zones étroites ainsi que les petites poches, par ex. sous la marge de la plaie.

* Au cas où Prontosan® Solution de rinçage de plaies n'est pas disponible pour imbibier la compresse, toute autre solution de rinçage des plaies adaptée peut être utilisée.

SURVOL DES PRODUITS

Article	Unité	N° art.	Pharmacode
12 x 8.3 cm, forme de goutte	3 pièces	3908456	7313096
12 x 8.3 cm, forme de goutte	10 pièces	3908457	7313104

Composition

Microfibres en polyester/polypropylène, couche absorbante en propylène. Les compresses sont emballées individuellement de façon stérile.

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market : Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com