



VIRUCIDA E
SPORICIDA



Stabimed® ultra

Disinfezione e pulizia manuale degli strumenti
ad azione sporicida e virucida rapida

Stabimed® ultra

Disinfettante di alto livello virucida e sporicida specifico per endoscopi flessibili

CARATTERISTICHE

- Polvere per disinfezione di alto livello a base di acido peracetico
- Eccellente compatibilità con i materiali
- Elevate prestazioni di pulizia, senza fissaggio delle proteine
- Ampio spettro d'azione: batteri [incl. MRSA, micobatteri (TbB)], funghi e spore (Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium difficile). Limitatamente virucida (incl. HBV, HCV, HIV)⁴⁾ e virucida⁴⁾
- Ottimo anche per la pulizia disinfettante preliminare
- Utilizzabile in bagno a ultrasuoni
- Adatto per la disinfezione finale virucida di presidi medico-chirurgici semicritici
- Senza aldeidi e fenoli, senza ammine
- Nessun'incompatibilità con altri gruppi di principi attivi
- Inserito nelle liste DGHM¹⁾/VAH²⁾ e incluso nell'elenco dei virucidi IHO³⁾

AVVERTENZE PER L'USO

1. Versare la quantità di acqua di rubinetto tiepida richiesta nella vaschetta per strumenti
2. Misurare la polvere e aggiungerla all'acqua
3. Mescolare finché la polvere si è sciolta e si è formata una soluzione trasparente (10 – 15 min.)
4. Sostituire la soluzione ogni giorno di lavoro oppure quando è presente una contaminazione visibile

Dati chimico-fisici

Valore pH (20 °C):
Densità (20 °C, g / cm³):
Aspetto:
Odore:

Concentrato

n.a.
n.a.
polvere bianca
neutro

Soluzione pronta all'uso

Circa 7 – 8
ca. 1 g / cm³
trasparente, azzurra
caratteristico

SPETTRO DI EFFICACIA/TEMPO D'AZIONE (TA)

Campo d'impiego	Conc.	TA	Quantità per 5 litri
Disinfezione di strumenti conforme a DGHM ¹⁾ /VAH ²⁾ battericida, levurocida, tubercolocida, microbattericida, virucida e sporicida	2%	10 min.	5 misurini da ~ 25 ml (20 g) di polvere ciascuno
Fungicida (Aspergillus brasiliensis)	2%	15 min.	



Articolo	Cod. art.	Pharmacode
6 flaconi da 800 g ciascuno con misurino	19812	7573070

Stabimed® ultra – Composizione:

La soluzione all'1% (10 g di polvere / l d'acqua) contiene lo 0.16% di acido peracetico. Indicazioni conformi al Regolamento sulle sostanze pericolose: Irritante per gli occhi. Non inalare la polvere. In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico. Indossare guanti protettivi idonei. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Avvertenze

Utilizzare i disinfettanti in maniera sicura. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

1) DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (Società Tedesca di Igiene e Microbiologia)

2) VAH = Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (Associazione per l'Igiene Applicata)

3) www.iho-viruzidie-liste.de

4) secondo RKI 01/2004