

# Anwendung Fluo-Add

## FLUORESZIERENDE TRAININGSLÖSUNG HÄNDEDESINFEKTION



1 Flaschen öffnen



2 1 ml Fluo-Add entnehmen



3 Entnommenes Fluo-Add in 100 ml Händedesinfektionsmittel füllen



4 Deckel schliessen und gut schütteln. Die Testlösung ist bereit für eine Schulung und kann sofort eingesetzt werden.



5 Aufkleber auf zubereitete Trainingslösung kleben.  
**Die Flüssigkeit darf nur noch für Testzwecke verwendet werden!**