



SENZA PROFUMI



Hexaquart[®] pure

Concentrato senza aldeidi e senza ammine
per disinfezione e detergenza

Hexaquart® pure

Concentrato senza aldeidi e senza ammine

CARATTERISTICHE

- Concentrato per la disinfezione e detersione di inventario e pavimenti
- Senza aldeidi, senza ammine e senza profumo
- Brevi tempi d'azione – possibile disinfezione rapida (5 min.)
- Efficace contro batteri (incl. MRSA) e miceti; limitatamente virucida (incl. HBV, HCV, HIV) ed efficace contro polyomavirus e norovirus
- Buona compatibilità con i materiali più frequentemente usati per pavimenti e inventario
- Utilizzabile nei sistemi dispenser di salviette B. Braun Wipes, conservabilità 4 settimane
- Per la disinfezione di scarpe e calze
- Idoneo per la pulizia e disinfezione di mascherine protettive
- Adatto anche per il settore alimenti

Incluso negli elenchi DGHM/VAH e nell'elenco virucida IHO

SPETTRO D'AZIONE/TEMPI D'AZIONE

Campo d'impiego	Conc.	TA	Quantità di concentrato / 1 litro
Disinfezione delle superfici a norma DGHM/VAH battericida / levurocida EN 16615 (4 field test)	1.0%	5 min.	10 ml
	0.5%	15 min.	5 ml
limitatamente virucida EN 14476 (inclusi HBV, HCV, HIV)	1.0%	5 min.	10 ml
	0.5%	30 min.	5 ml
Polyomavirus EN 14476			
	Carica bassa	2.0%	5 min. 20 ml
Carica elevata	2.0%	15 min. 20 ml	
Norovirus* prEN 16777	2.0%	1 ore	20 ml
Disinfezione di scarpe e calze EN 13697			
	3.0%	15 min.	30 ml
Trattamento di superfici in aree sanitari a uso medico e piscine			
	2%	5 min.	5 ml
	1%	15 min.	10 ml

* Virus surrogato dell'MNV

Dati chimico-fisici

Concentrato:
Aspetto: incolore - giallino
Densità: 1 g/ml
Valore pH: circa 9

Avvertenza:

Utilizzare i disinfettanti in maniera sicura. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Hexaquart® pure – Composizione

100 g contengono: 10 g didecildimetilammonio cloruro, 10 g C12-16-alcilbenzildimetilammonio cloruro. Indicazioni conformi al Regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di detergenti: < 5 tensioattivi non ionici, complessanti.

SENZA PROFUMI



AVVERTENZE PER L'USO E IL DOSAGGIO

La soluzione pronta all'uso va preparata con acqua (max. 25 °C) (vedere tabella dei dosaggi). Il dosaggio può venir eseguito mediante misurini, pompe dosatrici oppure dosatori centralizzati o decentralizzati. Inumidire abbondantemente le superfici, lasciar asciugare senza ripassare.

COMPATIBILITÀ CON I MATERIALI

Utilizzabile per: metalli, plastiche, ad es. polimetacrilato (vetro acrilico), elastomeri e pavimenti

Articolo	UV	Cod. art.	Pharmacode
Flacone da 1000 ml	1	19942	7670092
Tanica da 5 litri	1	19943	7670117

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com