

Infusomat[®] compact^{plus}

ISTRUZIONI PER L'USO BREVI



ACCENSIONE E INIZIO INFUSIONE

1. Premere per accendere il dispositivo.
2. Seguire le istruzioni sullo schermo:
 - Aprire lo sportellino della pompa tirando in avanti la levetta verde.
 - Inserire la linea come segue:
 1. Inserire il fermaglio di sicurezza verde nello spazio verde corrispondente esercitando pressione finché udirete un «CLIC».
 2. Inserire l'elemento arancione nel foro arancione del dispositivo.
 3. Spingere la linea di infusione nella scanalatura a sinistra e a destra.
 4. Chiudere lo sportellino della pompa con la levetta estratta usando entrambe le mani.
3. Seguire le indicazioni nella finestra del menu:
 - Aprire la rotellina del regolatore sul deflussore e confermare con .
 - Confermare la linea «Universale» con .
4. Mentre il dispositivo effettua la calibrazione connettere il sistema di somministrazione al paziente.
5. Inserire la velocità di somministrazione premendo .
6. Iniziare la terapia con .



CAMBIARE LA VELOCITÀ DI INFUSIONE

1. Durante la somministrazione premere uno dei seguenti tasti .
2. Inserire la nuova velocità desiderata.
3. Premere per confermare.

Blocco tastiera

Per procedere al blocco premere e tenere premuto il tasto per alcuni secondi. Il display visualizza l'attivazione. Per sbloccare il dispositivo procedere allo stesso modo. I t non sono bloccati.

CAMBIARE IL DEFLUSSORE O FINE TERAPIA

1. Fermare il dispositivo premendo .
2. Sconnettere il deflussore dal paziente.
3. Aprire la porta tirando verso di sé la leva verde.
4. Sostituire il deflussore o chiudere la porta e premere per 1.5 secondi il tasto per spegnere il dispositivo.

INIZIARE NUOVA TERAPIA SENZA SPEGNERE IL DISPOSITIVO

1. Fermare il dispositivo con .
2. Premere e con selezionare «azzeramento terapia» .
3. Rispondere alla domanda con «sì» o «no».

A seconda dell'ultima terapia, ci si trova automaticamente nella finestra del menu «Portata» o nelle finestre di selezione di un medicamento.

SOMMINISTRAZIONE BOLO

Ci sono 3 modalità diverse per la somministrazione di un bolo:

1. Bolo manuale:
 - Premere . Compare l'indicazione «Bolo». Premere nuovamente e tenere premuto il tasto . Il contenuto della siringa verrà somministrato finché il tasto rimane premuto o finché è raggiunta la durata/somministrazione massima.
 - È indicato il volume di bolo somministrato. È emesso un segnale acustico ogni 1 ml somministrato.
 - La somministrazione del bolo termina al rilascio del tasto .
2. Bolo con volume preselezionato:
 - Premere . È visualizzata l'indicazione «Bolo».
 - Premere e inserire il volume di bolo desiderato.
 - Premere , per iniziare la somministrazione del bolo.
 - La somministrazione del bolo può essere interrotta in qualsiasi momento con .
3. Bolo con volume e durata preselezionati:
 - Premere . Compare l'indicazione «Bolo».
 - Premere e inserire il volume di bolo desiderato. Confermare con .
 - Aprire la finestrella di preselezione della durata con e , inserire la durata del bolo e avviare la somministrazione del con .
 - La somministrazione del bolo può essere interrotta in qualsiasi momento con .

DATABASE DEI MEDICINALI

1. Premere e aprire il menu principale.
2. Navigare fino alla voce del menu «Medicamento», confermare la selezione con .
3. Nel caso siano archiviati diversi medicinali eventualmente selezionare la stazione e il profilo del paziente e confermare con .
4. Scegliere la categoria di medicinali e confermare con , scegliere il medicamento/la concentrazione e confermare con .
5. Leggere le eventuali informazioni archiviate e confermare con .
6. Inserire la portata e avviare l'infusione con .

Prima di iniziare la terapia l'utilizzatore deve accertarsi che il database dei medicinali archiviato nella pompa corrisponda al gruppo target del paziente da trattare. Nella pompa è mostrata la denominazione del database medicinali.