


Infusomat[®] plus Leitung - Handhabungsposter

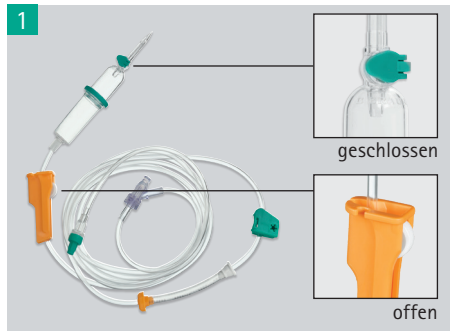

Entnahme des Infusionsbestecks aus der Verpackung:

- Belüftungsklappe geschlossen
- Rollenklemme offen



- Anstechen des aufrecht stehenden Infusionslösungsbehälters (z. B. Glasflasche, Ecoflac[®], etc.)
- Rollenklemme schliessen



Flüssigkeitsspiegel einstellen:


- Tropfkammer bis grünen Ring füllen
- Nach Befüllen gegen unteren Teil der Tropfkammer schnippen



- Rollenklemme öffnen
- Leitung manuell entlüften



- Gerät einschalten und Selbsttest des Gerätes abwarten
- Pumpentür durch nach vorne Ziehen des Türhebels öffnen

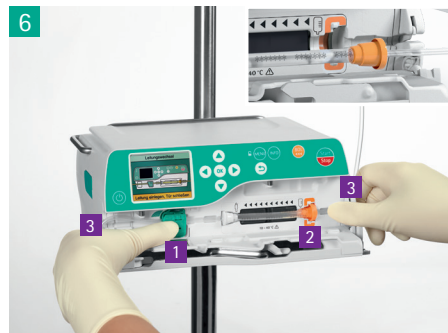

(Achtung: von links nach rechts)

- 1 Einlegen der Infusomat[®] plus Leitung: Grüne Sicherheitsklemme in die grüne Aufnahme einlegen und festdrücken (→ KLICK)
- 2 Orangefarbenen Clip in die orange Öffnung der Pumpe legen
- 3 Infusionsleitung links und rechts nach hinten in die Nut drücken



- Pumpentür mit gezogenem Türhebel mit Hilfe beider Hände schliessen
- Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, **ROLLENKLEMME ÖFFNEN**
- Mit OK bestätigen. Die Pumpe führt eine Kalibrierung durch
- Anweisungen im Display folgen