



IGIENE DELLE
MANI



FORMAZIONE SULL'IGIENE DELLE MANI

PER VERIFICARE LA TECNICA DI STROFINAMENTO CORRETTA

LiteCheck UV



PER VERIFICARE LA TECNICA DI STROFINAMENTO CORRETTA

B. Braun presenta LiteCheck UV, uno strumento dal pratico formato a cartelletta che, assieme al vostro disinfettante per le mani e al Fluo-Add fluorescente, serve per la formazione sull'igiene delle mani. La solution d'essai est préparée comme suit: Per mezzo di una pipetta, 1 ml di Fluo-Add ogni 100 ml di disinfettante per le mani. Chiudere il coperchio e agitare bene. Così la soluzione per prova sarà pronta al uso. Il prodotto può essere utilizzato im-



mediatamente. Dopo che queste sono state frizionate con la soluzione di prova preparata, LiteCheck evidenzia, per mezzo della luce UV, le parti delle mani non bagnate dalla soluzione. Le aree cutanee non sufficientemente strofinate con il liquido rimangono scure. Queste sono le aree in cui i batteri possono sopravvivere. Per contro, dopo un uso corretto e senza lacune, le mani risplendono tutte in colore blu.

USO INADEGUATO

Inumidimento inadeguato dei dorsi delle mani dopo la disinfezione delle stesse (in percentuale)¹

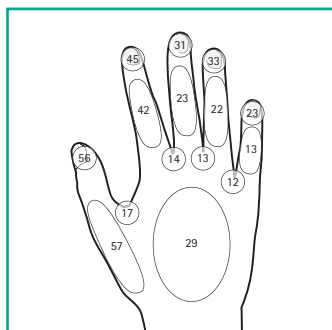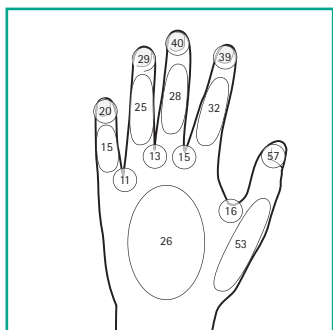

Inumidimento inadeguato dei palmi delle mani dopo la disinfezione delle stesse (in percentuale)¹

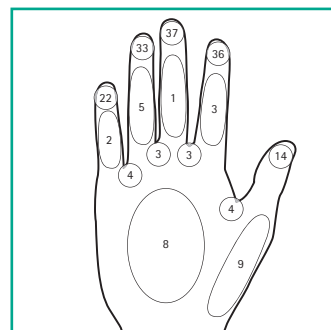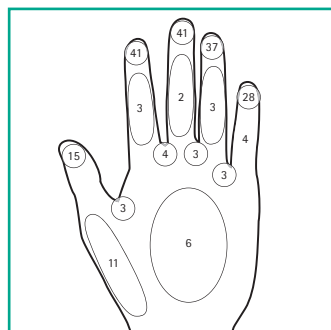


1) O. Buchrieser, G. Neuhold, A. Kristl, V. Buchrieser, T. Miorini, Incomplete wetting as a weak point of performing hygienic hand disinfection, Hyg Med, 12, 672 (1996)

VANTAGGI

- Aumenta la compliance e migliora la tecnica di strofinamento
- Sostegno per l'igiene delle mani
- Migliora il successo dell'apprendimento
- Tecnologia UV sicura
- Eccellente potere illuminante e di contrasto in combinazione con Fluo-Add
- Si installa rapidamente ed è pronto all'uso in pochi secondi
- Pratico, leggero e sempre a portata di mano

PRODOTTO	COD.ART.	PHARMACODE
B. Braun Litecheck UV incl. Fluo-Add 100 ml	3908469	7078695
Flacone Fluo-Add 100 ml	180127	7748785

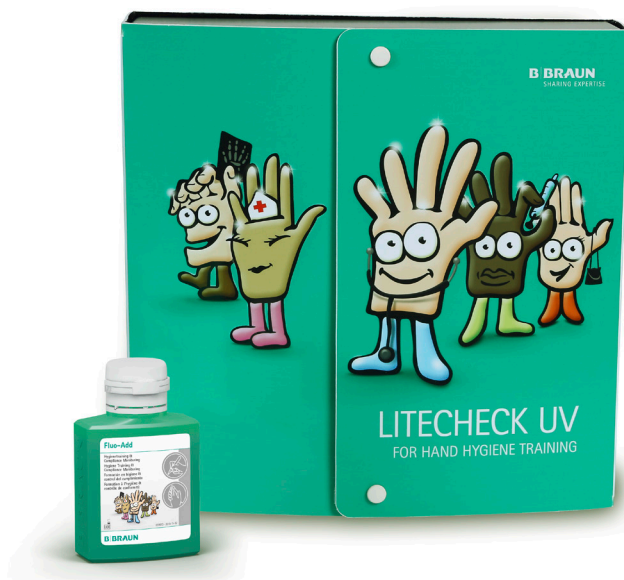

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com