

HYGIÈNE  
DES MAINS



# HYGIÈNE DES MAINS – EXERCICE DE FRICTION

EXERCEZ-VOUS À FRICTIONNER VOS MAINS CORRECTEMENT

# LiteCheck UV



## POUR LA VÉRIFICATION DE LA MÉTHODE CORRECTE DE FRICTION

B. Braun présente LiteCheck UV, un instrument pratique au format d'un classeur A4 qui est utilisé avec votre désinfectant pour les mains et le Fluo-Add fluorescent pour la formation en hygiène des mains. La solution d'essai est préparée comme suit: 1 ml de Fluo-Add au moyen d'une pipette, pour 100 ml de produit de désinfection des mains. Fermer le couvercle et bien agiter. La solution de test est maintenant prête pour la formation. Le produit peut être utilisé immédiatement.



Après s'être frotté les mains avec la solution test préparée, LiteCheck montre, à l'aide d'une lumière UV, les parties de la main qui n'ont pas été couvertes par la solution. Les parties de la peau qui ne sont pas suffisamment frictionnées avec le liquide restent sombres. Dans ces zones, les germes peuvent survivre. Toutefois, après une application correcte et complète, les mains sont intégralement illuminées en bleu.

## ZONES DE LACUNE D'APPLICATION

Suite à la désinfection, l'application est insuffisante sur le dos des mains (pourcentage)<sup>1</sup>

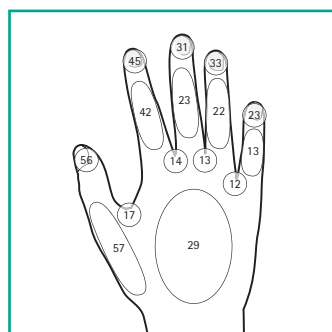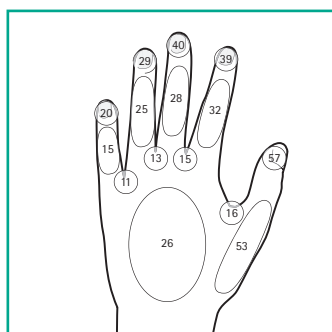

Suite à la désinfection, l'application est insuffisante sur la paume des mains (pourcentage)<sup>1</sup>

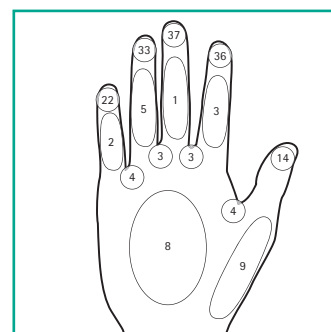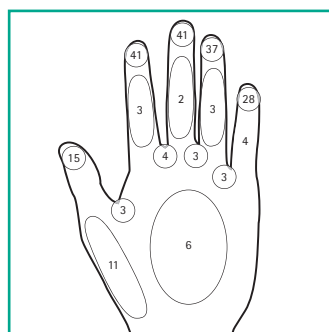

1) O. Buchrieser, G. Neuhold, A. Kristl, V. Buchrieser, T. Miorini, Incomplete wetting as a weak point of performing hygienic hand disinfection, Hyg Med, 12, 672 (1996)

## AVANTAGES

- Augmente la compliance et améliore la technique de friction
- Favorise une désinfection correcte des mains
- Améliore la réussite de la formation
- Technologie UV sûre
- Lumière et contraste excellents en combinaison à Fluo-Add
- Installation rapide et utilisable en quelques secondes
- Pratique, léger et toujours à portée de main

PRODUIT	N° D'ART	PHARMACODE
B. Braun Litecheck UV	3908469	7078695
Flacon Fluo-Add 100 ml	180127	7748785



B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)  
Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | [sales-hospital.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-hospital.bbmch@bbraun.com)  
Out Patient Market : Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | [sales-opm.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-opm.bbmch@bbraun.com)