


# GEBRAUCHSANLEITUNG

## Uro-Tainer® Polihexanid


### VEREINFACHTE KATHETERPFLEGE

Uro-Tainer® ist ein steriles, gebrauchsfertiges Einmalsystem zur Katheterpflege. Es vermindert in erheblichem Masse das Risiko von Harnwegsinfektionen und die Häufigkeit von Katheterwechseln. Der gesamte Vorgang erfolgt in einem geschlossenen Kreislauf, ohne dass Luft ein- oder austritt.

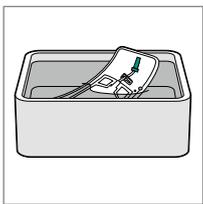


#### SCHRITT 1

Uro-Tainer® in lauwarmem Wasser auf Körpertemperatur erwärmen. Inzwischen sorgfältig Hände desinfizieren. Nach Möglichkeit Einweghandschuhe tragen.

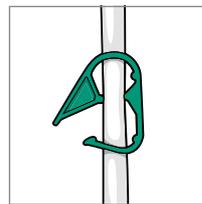


#### SCHRITT 5

Klemme öffnen und einige Tropfen der Uro-Tainer® Spüllösung in den Katheter fließen lassen, um allfällige Lufteinschlüsse zu entfernen.

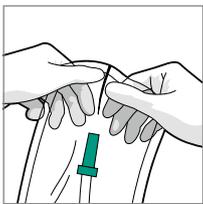


#### SCHRITT 2

Plastikhülle öffnen und Uro-Tainer® entnehmen.

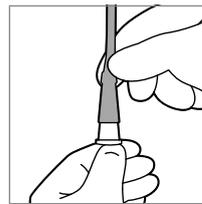

#### SCHRITT 6

Anschlusskonus in den Kathetertrichter einführen und Uro-Tainer® Spüllösung einfließen lassen. (wie in Schritt 7 beschrieben)

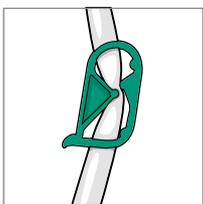


#### SCHRITT 3

Schlauch des Uro-Tainer® mit der Kunststoffklemme verschliessen.



#### SCHRITT 7

Uro-Tainer® über Blasenhöhe halten und Flüssigkeit mithilfe der Schwerkraft einlaufen lassen, bis ein Stillstand erreicht ist. Keinen Druck auf den Beutel ausüben.

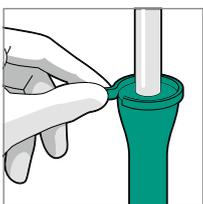

#### SCHRITT 4

Die Sicherheitsversiegelung von der Kappe abziehen. Kappe drehen und entfernen, ohne den sterilen Anschlusskonus zu berühren.



#### SCHRITT 8

Sobald die Flüssigkeit nicht weiter einläuft, den Uro-Tainer® unterhalb des Blasen-niveaus senken, damit die Flüssigkeit sogleich wieder zurück in den Beutel fließt. Wenn der Beutel voll ist, Schlauch mit Klemme verschliessen und den Kon-  
nektor durch leichtes Drehen vom Kathe-  
ter lösen. Drainagebeutel an den Kathe-  
ter anschliessen und Uro-Tainer® nach  
Gebrauch entsorgen. Hände desinfizieren.  
Uro-Tainer® nur zum einmaligen Gebrauch  
verwenden.

Bitte beachten Sie die Warnhinweise  
und Vorsichtsmassnahmen sowie  
mögliche Nebenwirkungen in den  
Benutzerinformationen.