


ISTRUZIONI PER L'USO

Uro-Tainer® Suby G / Uro-Tainer® Solutio R


CURA DEI CATETERI SEMPLIFICATA

Uro-Tainer® è un sistema monouso sterile pronto all'uso per la cura dei cateteri. Riduce notevolmente la formazione di cristalli, il rischio di infezioni alle vie urinarie e la frequenza di cambio dei cateteri. L'intera procedura è eseguita a ciclo chiuso, senza fuoriuscite o penetrazioni d'aria.

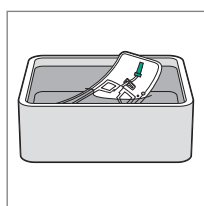


FASE 1

Riscaldare Uro-Tainer® a temperatura corporea in acqua tiepida. Nel frattempo disinfettare accuratamente le mani. Se possibile, indossare guanti monouso.

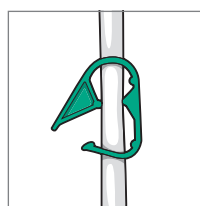


FASE 5

Aprire il morsetto e lasciar fluire nel catetere alcune gocce della soluzione di lavaggio Uro-Tainer® in modo da eliminare eventuali inclusioni d'aria.

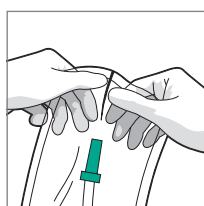


FASE 2

Aprire l'involucro in plastica ed estrarre Uro-Tainer®.

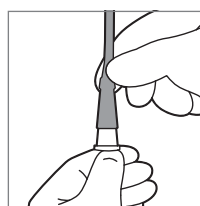

FASE 6

Introdurre il cono di connessione nell'imbuto del catetere e lasciar affluire la soluzione di lavaggio Uro-Tainer®. (come illustrato nella fase 7)

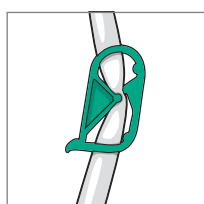


FASE 3

Chiudere il tubicino flessibile dell'Uro-Tainer® con il morsetto in plastica.



FASE 7

Tenere l'Uro-Tainer® ad altezza superiore a quella della vescica e instillare il liquido per gravità. Non esercitare pressioni sulla sacca. Chiudere il morsetto in plastica. Non staccare la sacca dal catetere.

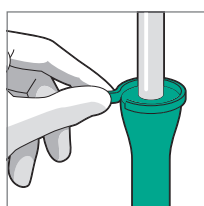

FASE 4

Staccare il sigillo di sicurezza dal cappuccio. Ruotare il cappuccio e rimuoverlo senza toccare il cono di connessione sterile.



FASE 8

Dopo 5 minuti aprire il morsetto e abbassare l'Uro-Tainer® a livello inferiore a quello della vescica di modo che il liquido rifluisca nella sacca. Quando questa è piena, chiudere il flessibile con il morsetto e, con una leggera rotazione, staccare il connettore dal catetere. Collegare al catetere la sacca da drenaggio e dopo l'uso smaltire Uro-Tainer®. Disinfettare le mani. Uro-Tainer® è un prodotto monouso.

Si prega di osservare le avvertenze e le precauzioni così come i possibili effetti collaterali nelle informazioni per l'utente.