

Perfusor[®] compact^{plus}

ISTRUZIONI PER L'USO BREVI



MESSA IN SERVIZIO E INIZIO INFUSIONE

1. Premere per accendere il dispositivo.
2. Seguire le istruzioni sullo schermo:
 - Sbloccare il braccio della pompa premendo le chele verdi.
 - Spostare a destra il braccio.
 - Tirare verso di sé il gancio siringa e girarlo verso sinistra.
 - Inserire la siringa: attenzione ad una corretta posizione delle alette.
 - Girare il gancio siringa nella posizione iniziale.
 - Premere le chele verdi del braccio pompa e posizionarlo lentamente sullo stantuffo della siringa. Una volta raggiunto lo stantuffo la siringa viene bloccata automaticamente.
3. Confermare il modello di siringa inserito con .
4. Connettere il sistema al paziente. A seconda dell'ultima terapia, la pompa si avvia in automatico con l'inserimento della portata o con la scelta di un medicamento.
5. Selezionare la velocità di somministrazione premendo .
6. Avviare l'infusione con .



CAMBIARE LA VELOCITÀ DI INFUSIONE

1. Per modificare la portata a infusione in corso premere uno dei tasti freccia .
2. Inserire la nuova velocità.
3. Premere per proseguire l'infusione con la velocità modificata.

Alternativa

1. Arrestare la pompa con .
2. Premere uno dei tasti freccia e inserire la nuova velocità.
3. Premere per avviare l'infusione con la velocità modificata.

Blocco tastiera

A infusione in corso è possibile bloccare la tastiera in modo da proteggerla da eventuali azionamenti involontari. Per procedere al blocco premere e tenere premuto il tasto per alcuni secondi. Il display visualizza l'attivazione. Per sbloccare il dispositivo procedere allo stesso modo. I tasti e non sono bloccati.

CAMBIO DI SIRINGA

1. Arrestare la pompa con .
2. Staccare la connessione con il paziente.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo:
 - Sbloccare il braccio pompa riunendo le chele verdi e spostarlo a destra.
 - Tirare verso di sé il gancio siringa, girarlo a sinistra e tenere la siringa in mano.
4. Rimuovere la siringa e inserirne una nuova (vedere sopra).



RESET DELLA TERAPIA E INIZIO DI UNA NUOVA TERAPIA

1. Arrestare la pompa con .
2. Premere e con deselezionare la voce di menu «azzeramento terapia». Confermare con .
3. Rispondere alla domanda con «sì» o «no».

A seconda dell'ultima terapia, ci si trova automaticamente nella finestra del menu «Portata» o nelle finestre di selezione di un medicamento.

BOLO

Vi sono 3 modalità per la somministrazione di un bolo:

1. Bolo manuale:
 - Premere . Premere nuovamente e tenere premuto il tasto per la somministrazione. Il contenuto della siringa verrà somministrato finché il tasto rimane premuto o sia raggiunto il volume/tempo limite.
 - Per ogni 1 ml somministrato si può udire un suono
2. Bolo con volume preselezionato:
 - Premere .
 - Premere e inserire il volume di bolo desiderato.
 - Premere per iniziare la somministrazione.
 - Si può interrompere il bolo in qualsiasi momento con .
3. Bolo con volume e durata preselezionati:
 - Premere .
 - Premere e inserire il volume desiderato e confermare con .
 - Premere e per aprire la finestra di selezione della durata, inserire tale dato e iniziare il bolo premendo .
 - Si può interrompere il bolo in qualsiasi momento con .

DATABASE MEDICAMENTI (OPZIONALE)

1. Premere e aprire il menu principale.
2. Navigare fino alla voce del menu «farmaco», confermare la selezione con .
3. Nel caso siano archiviati diversi medicinali eventualmente selezionare la stazione e il profilo del paziente e confermare con .
4. Scegliere la categoria di medicinali e confermare con , scegliere il medicamento/la concentrazione e confermare con .
5. Leggere le eventuali informazioni archiviate e confermare con .
6. Inserire la velocità e avviare l'infusione con .

Prima di iniziare la terapia l'utilizzatore deve accertarsi che il database dei medicinali archiviato nella pompa corrisponda al gruppo target del paziente da trattare. Nella pompa è mostrata la denominazione del database medicinali.