

Perfusor[®] compact^{plus}

MINI-GUIDE



MISE EN SERVICE ET DÉBUT DE LA PERFUSION

1. Appuyer sur pour allumer l'appareil.
2. Suivre les instructions à l'écran :
 - Déverrouiller la tête d'entraînement avec le levier de fixation.
 - Pousser la tête d'entraînement vers la droite.
 - Tirer le verrou de la seringue et le tourner vers la gauche ou la droite.
 - Insérer la seringue en veillant au positionnement correct des ailettes.
 - Tourner le verrou de la seringue afin qu'il retourne à sa position initiale.
 - Pousser le levier de fixation et pousser lentement la tête d'entraînement vers la seringue. Lorsque que le piston de la seringue est atteint, la seringue est automatiquement emboîtée.
3. Confirmer le type de seringue inséré par .
4. Etablir la connexion avec le patient. Selon le dernier traitement, la pompe se lance automatiquement soit avec l'entrée du débit d'alimentation, soit avec la sélection d'un médicament.
5. Indiquer le débit d'alimentation par .
6. Démarrer la perfusion par .



MODIFIER LE DÉBIT D'ALIMENTATION ET VERROUILLER LE CLAVIER

1. Pour changer le débit d'alimentation pendant la perfusion en cours, appuyer sur une des flèches .
2. Indiquer le nouveau débit.
3. Appuyer sur pour continuer la perfusion avec le débit modifié.

Alternative

1. Arrêter la pompe par .
2. Appuyer sur une des flèches et indiquer le nouveau débit.
3. Appuyer sur pour démarrer la perfusion avec le débit modifié.

Verrouiller le clavier

Lors de la perfusion en cours, il est possible de verrouiller le clavier pour éviter toute manipulation involontaire. Appuyer sur et maintenir la touche enfoncée pendant quelques secondes. L'activation est indiquée à l'écran. Pour déverrouiller l'appareil, suivre la même procédure. Les touches et ne sont pas verrouillées.

CHANGEMENT DE SERINGUE

1. Arrêter la pompe par .
2. Interrompre la connexion avec le patient.
3. Suivre les instructions à l'écran :
 - Déverrouiller la tête d'entraînement avec le levier de fixation et le pousser vers la droite.
 - Tirer le verrou de la seringue et le tourner vers la gauche ou la droite en tenant la seringue fermement.
4. Retirer la seringue et en insérer une nouvelle (voir ci-dessus).



RÉINITIALISER LE TRAITEMENT ET COMMENCER UN NOUVEAU TRAITEMENT

1. Arrêter la pompe par .
2. Appuyer sur et sélectionner le menu « Réinitial. thérapie » avec les flèches . Confirmer en appuyant sur .
3. Répondre à la question par « Oui » ou « Non ».

Selon le dernier traitement, vous vous trouvez automatiquement dans la fenêtre de menu « Débit » ou dans les fenêtres de sélection d'un médicament.

ADMINISTRATION DE BOLUS

Il existe trois possibilités différentes pour l'administration de bolus :

1. Bolus manuel :
 - Appuyer sur . L'indication « Bolus » apparaît. Appuyer à nouveau sur et maintenir la touche enfoncée. Du liquide est administré aussi longtemps que la touche est enfoncée ou jusqu'à ce que la durée/l'administration maximale soit atteinte.
 - Le volume de bolus administré est affiché. Un signal acoustique retentit tous les 1 ml de bolus administrés.
 - L'administration de bolus est arrêtée lorsque la touche est relâchée.
2. Bolus avec pré-sélection du volume :
 - Appuyer sur . L'indication « Bolus » apparaît.
 - Appuyer sur et indiquer le volume de bolus souhaité.
 - Appuyer sur pour lancer l'administration de bolus.
 - Avec , l'administration de bolus peut être interrompue à tout moment.
3. Bolus avec pré-sélection du volume et de la durée :
 - Appuyer sur . L'indication « Bolus » apparaît.
 - Appuyer sur et indiquer le volume de bolus souhaité. Confirmer avec .
 - Ouvrir la fenêtre de sélection de la durée avec et , indiquer la durée du bolus et démarrer l'administration de bolus avec .
 - Avec , l'administration de bolus peut être interrompue à tout moment.

BASE DE DONNÉES DE MÉDICAMENTS (OPTIONNEL)

1. Appuyer sur et ouvrir le menu principal.
2. Naviguer jusqu'au menu « Médicament », confirmer la sélection par .
3. Si plusieurs médicaments sont enregistrés, choisir, le cas échéant, le profil de patient et la station et confirmer par .
4. Choisir la catégorie de médicament et confirmer par , choisir le médicament/la concentration et confirmer avec .
5. Le cas échéant, lire les informations enregistrées et confirmer avec .
6. Indiquer le débit d'alimentation et démarrer la perfusion avec .

Avant le début du traitement, l'utilisateur doit s'assurer que la base de données de médicaments enregistrée dans la pompe correspond bien au groupe cible de patients à traiter. La désignation de la base de données de médicaments est indiquée dans la pompe.